

راهنمای سریع استفاده از فلومتر TF-15



01. قبل از استفاده از محصول، از سالم بودن ظاهری آن مطمئن شوید.
02. شیر تنظیم اکسیژن را تا انتها ببندید.
03. در صورت نیاز به اکسیژن مرطوب، همودیفایر (مخزن مرطوب کن) را تا مقدار مجاز مشخص شده روی بدنه مخزن از آب مقطر پر نمایید و درب آن را محکم ببندید. سپس مخزن همودیفایر را به زیر فلومتر متصل نموده و مهره آن را کاملاً محکم نمایید.
04. در صورت نیاز به اکسیژن خشک، سرشلنگ خور را به زیر فلومتر بسته و کاملاً محکم نمایید.
05. فلومتر را در حالت عمودی به آتلنت اکسیژن متصل نمایید.
06. شلنگ اکسیژن بیمار را به خروجی همودیفایر و یا سرشلنگ خور متصل کنید.
07. شیر تنظیم اکسیژن را به سمت چپ بچرخانید تا میزان اکسیژن لازم به بیمار منتقل شود.
08. میزان دقیق فلوی انتقالی به بیمار را می توانید با مشاهده عدد مقابل گوی شناور داخل لوله مدرج تنظیم نمایید.
09. پیشنهاد می گردد هنگام عدم استفاده از فلومتر، آن را از آتلنت جدا نمایید.

نظافت و ضدعفونی:

01. سطوح خارجی فلومتر را می توانید بوسیله آب و صابون تمیز نموده و سپس با پارچه نرم کاملاً خشک نمایید.
02. در صورت استفاده از مواد ضدعفونی کننده کنترل نمایید که ماده مورد استفاده با مواد پلاستیکی سازگاری داشته باشد.
03. هرگز از مواد شوینده مخصوص کف اتاق جهت شستشوی این محصول استفاده نکنید.

توصیه های ایمنی:

01. از استعمال دخانیات در نزدیکی وسیله خودداری نمایید.
02. هرگز جهت اتصالات وسیله، از روغن یا گریس استفاده نکنید.
03. هرگز وسیله را با دستان چرب جابجا و حمل نکنید.
04. از استفاده وسیله در نزدیکی وسایل احتراقی خودداری نمایید.
05. هیچ قطعه ای را از وسیله در حال استفاده جدا نکنید.
06. همیشه باید وسیله در حالت عمودی مورد استفاده قرار بگیرد.
07. هنگام جابجایی وسیله نباید آب درون همودیفایر وارد فلومتر نشود.

